

Vær opmærksom på...

- I tilfælde af uventede eller usædvanlige glukosemålinger, bør insulinbehandlingen IKKE ændres uden at bekræfte glukosemålingerne vha. en blodglukosemåler. Man kan med fordel anvende G-PET Plus+ Glucometer.
- Hudirritation kan opstå som følge af en reaktion på den anvendte klæbepude eller lim.
- Nøjagtigheden kan variere i det hypoglykæmiske område på grund af begrænsninger i CGM-teknologien.
- Beskyttende foranstaltninger såsom petshirts, kræver osv. bør anvendes for at sikre, at sensoren forbliver på plads.
- Selvom de fleste kæledyr ikke er generet af sensoren, kan brugstiden ikke garanteres, og det er muligt, at dyret bider eller skraber enheden af.



G-Pet PLUS+ Glucometer
Til måling af blod glukose

Specifikationer

Sensorens levetid	Op til 14 dage
Intervaller	Hvert 3. min
Glukose område	2.0 - 42.0 mmol/L 180 - 756 mg/dL
Beskyttelsesklasse	IP27 (midlertidigt vandtæt)
Driftstemperatur	+5°C to +40°C
Sensor størrelse	22 x 4 mm

Support

For yderligere support
Lifetest Vet Equipment
Email: info@lifetest.dk
Tlf.nr. 23 90 90 81

InSight® Vet CGM

Kontinuerligt Glukose Monitorerings System

Quick User Guide - Dansk



Produktets indhold




Sådan kommer du igang

- 1 Download APP's
Opret bruger til dyreejer & veterinær
- 2 Forbered dyr
Klip, rens
Klar til påsættelse
- 3 Aktiver CGM og
forbind til ejers APP
- 4 Påsæt CGM på
patienten
- 5 Efter 30-60 min
monitorér de
første målinger

Download APP's

Scan QR-koderne for at
downloade app's

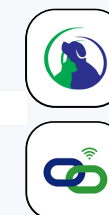

InSight Vet CGM app
(til dyreejer)

InSight Vet Connect app
(til veterinær)



Version: 2

2) Forberedelse af påsætningssted

Nødvendigt materiale til påsætning



Alkohol wipes

Rengør dyrets hud og fjern overskydende snavs og olie.



Evt. vævslim

Vævslim for bedre adhæsion.



Trimmer (anbefalet over 40 klinger/blade for tæt trimning)

Ved valg af påsætningssted, vær opmærksom på om dyret bruger sele eller halsbånd



Det sædvanlige sted at påføre CGM

Vælg indstikssted

- Vælg et plant område uden hudfolder
- Min. 5 mm tyk underhud
- Placér så dyret ikke kan kradse eller bide i CGM

Klip området med en trimmer

- Trim et område på 5-10 cm
- Jo tættere der klippes, desto bedre adhæsion

Rengør

- Brug en alkohol wibe el.lign. til at rengøre.
- Når stedet er tørt, er du klar til påsættelse af CGM


4) Påsætning af sensor




Bruges vævslim, påføres det CGM inden påsætning

Hold applikatoren mod huden. Tryk applikatoren mod det ønskede område.

Hold evt. en hånd mod dyret på modsatte side, for at undgå at dyret bliver forskrækket.

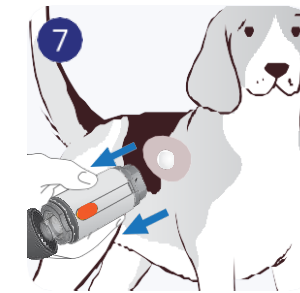

Hold applikatoren mod dyrets hud i 20 sekunder. Fjern derefter applikatoren forsigtigt.

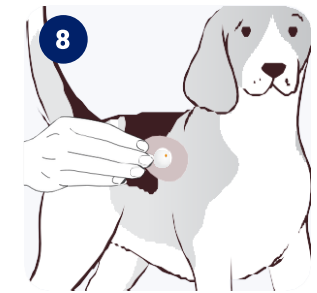

Påsæt det medfølgende plaster og gnid rundt om CGM for at sikre den bedste adhæsion.

Tips!

- Husk at ejer skal give adgang via sin app (Insight CGM app) til at dyrlægen må følge patienten
- Giv ejer applikator og æske med hjem, QR-koden skal anvendes, hvis ejer vil skifte telefon eller dyret hospitaliseres og en anden overtager monitoreringen.


Selvom vores CGM tolereres godt af de fleste kæledyr, kan brugsvareigheden ikke garanteres, da der er en risiko for, at kæledyr bider eller river enheden af.

Hvert kæledyr har forskellige kropsformer, personligheder og aktivitetsniveauer, så find den løsning der passer bedst til det enkelte dyr.

Vi anbefaler en petshirt (eks. CopperBody). Anvend kun permeable materialer, da Vet CGM kræver ilt for at fungere.




3) Aktivering af sensor

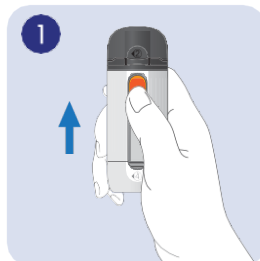

Følg pilen ①
Tryk knappen opad

Tryk den helt op, indtil du ikke kan trykke mere.

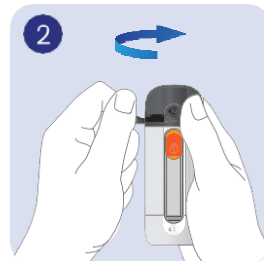

Følg pilen ②
Riv forseglingsringen af og åben top hættten.




Følg pilen ③
Tryk knappen ned

Tryk indtil du hører en kliklyd.




④
Forbind ejerapp med den aktiverede CGM sensor

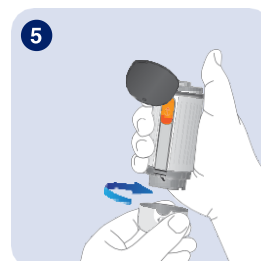

Følg pilen ⑤
Skrub bund hættten af.

Fjernelse af sensor

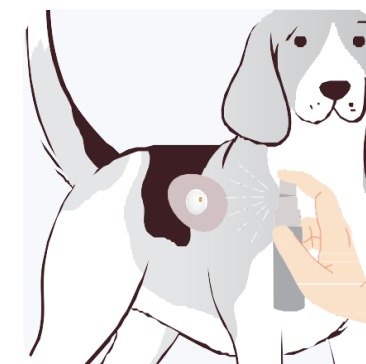

Forsøg forsigtigt at fjerne sensoren fra dit kæledyr's hud. Rengør området. Er området påvirket, så smør evt. lidt VETSALVE® el.lign. på.

