

Observera...

- Vid oväntade eller onormala glukosvärden ska insulinbehandlingen INTE ändras utan att glukosvärdena har bekräftats med en blodsockermätare. G-PET Plus+ glukosmätare rekommenderas för detta ändamål.
- Hudirritation kan uppstå som en reaktion på den självhäftande dynan eller limmet som används
- Noggrannheten kan variera inom det hypoglykemiska området på grund av begränsningar i CGM-tekniken.
- Skyddsåtgärder såsom tröjor etc. för husdjur bör användas för att säkerställa att sensorn förblir på plats.
- Även om de flesta husdjur inte störs av sensorn kan användningstiden inte garanteras och det är möjligt att djuret biter eller klöser bort enheten.



G-Pet PLUS+ Glucometer
För mätning av blodsocker

Specifikationer

Sensors livslängd	Upp till 14 dagar
Intervall	Var tredje minut
Glukoseintervall	2.0 - 42.0 mmol/L 180 - 756 mg/dL
Skyddsklass	IP27 (tillfälligt vattentät)
Driftstemperatur	+5°C to +40°C
Sensor storlek	22 x 4 mm

Support

För ytterligare support

Lifetest Vet Equipment

Email: info@lifetest.dk

Tlf.nr. 23 90 90 81


InSight® Vet CGM

System för kontinuerlig glukosövervakning

Quick User Guide - Svenska



Produktinnehåll

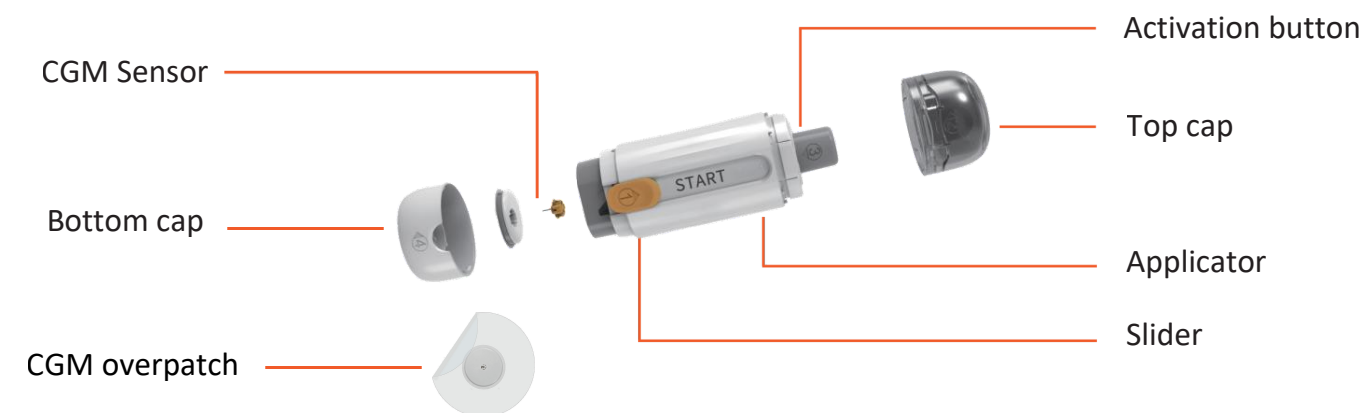


Så här kommer du igång

- 1** Ladda ner apparna
Skapa ett konto för
djurägare och
veterinärer
- 2** Förbered djuret.
Klipp/raka bort
pälsen och rengör
området inför
applicering
- 3** Aktivera CGM och
anslut till ägarens
app
- 4** Applicera CGM
på patienten
- 5** Efter 30–60 minuter
kontrollera de
första mätningarna

Ladda ner apparna

Skanna QR-koderna för
att ladda ner apparna

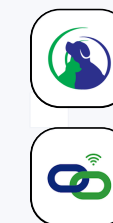

InSight Vet CGM-app
(för djurägare)

InSight Vet Connect-appen
(för veterinärer)



Version: 2

2) Förberedelse av applikationsplatsen

Material som behövs för installationen



Alkohol wipes

Rengör djurets hud och ta bort överflödigt smuts och fett.



Vävnadsklister, vid behov

Vävnadsklister för bättre vidhäftning.



Rakapparat

(Rekommenderas att använda minst nr. 40 för så nära trimning som möjligt)

När du väljer var enheten ska fästas, ta hänsyn till om djuret bär sele eller halsband.



Den vanliga platsen för att applicera CGM

Välj appliceringsplats

- Välj ett plant område utan hudveck
- Minst 5 mm tjockt subkutant skikt
- Placera så att djuren inte kan klia eller bita på CGM


Klipp området med en rakapparat

- Klipp ett område på 5–10 cm
- Ju närmare du klipper, desto bättre vidhäftning

Rengöring

- Använd en alkoholservett eller liknande för rengöring.
- När platsen är torr är du redo att applicera CGM


4) Applicera sensorn

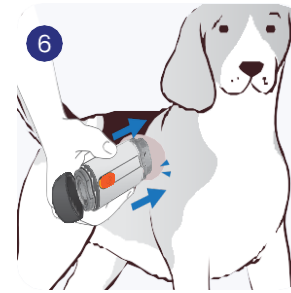


Om vävnadslim används, applicera det på CGM innan du fäster den.

Håll applikatoren mot huden. Tryck applikatoren mot önskat område.

Om det behövs, håll en hand mot djuret på motsatt sida för att förhindra att den drar sig undan.

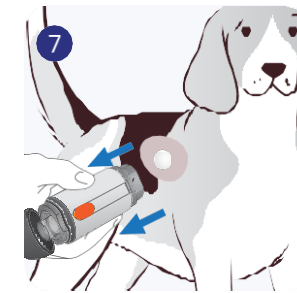

Håll applikatoren mot djurets hud i 20 sekunder. Ta sedan försiktigt bort applikatoren.

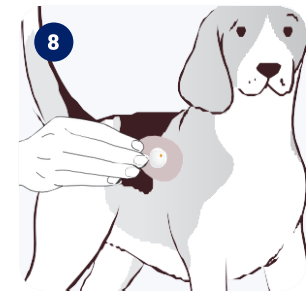

Applicera den medföljande självhäftande overpatch och gnugga runt CGM för att säkerställa bästa vidhäftning.

Tips!

- Tänk på att ägaren måste ge tillgång via sin app (Insight CGM-appen) så att veterinären kan övervaka patienten.
- Ge ägaren applikatoren och förpackningen att ta med hem. QR-koden måste användas om ägaren byter telefon eller om djuret läggs in på sjukhus och någon annan tar över övervakningen.


Även om vår CGM tolereras väl av de flesta husdjur kan användningstiden inte garanteras, eftersom det finns en risk att husdjur kan bita av eller riva av enheten.

Varje husdjur har olika kroppsform, personlighet och aktivitetsnivå, så hitta den lösning som passar det enskilda djuret bäst.


Vi rekommenderar en petshirt (t.ex. CopperBody). Använd endast genomträngliga material, eftersom Vet CGM behöver syre för att fungera.



3) Aktivering av sensor

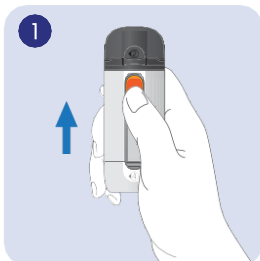

Följ pilen ①
Tryck knappen uppåt

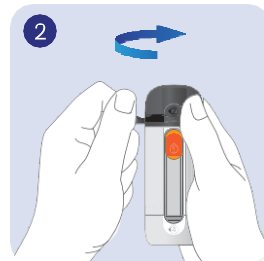


Följ pilen ②
Riv av tätningsringen och öppna 'top cap'



Följ pilen ③
Tryck ned 'activation button'


Tryck tills du hör ett klick.

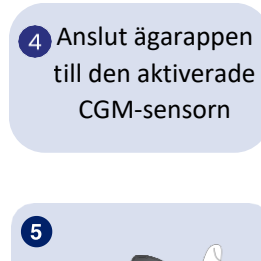

Följ pilen ④
Skruva av 'bottom cap'

Tryck upp den så långt det går tills du inte kan trycka längre.

Ta bort sensorn

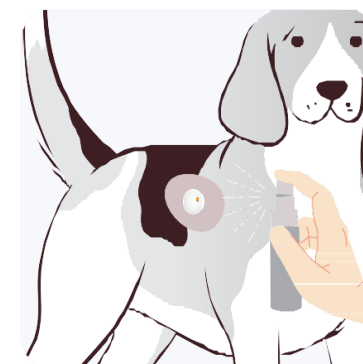

Försök försiktigt ta bort sensorn från ditt djurs hud. Rengör området. Om området är påverkat, applicera lite VETSALVE® eller liknande.